

BANDE ANTIOEDEME

PRODUITS DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ 	Référéncé CHU : Bande Short Stretch® (THUASNE) <ul style="list-style-type: none"> 750450 BDE ANTIOEDEME SHORT STRETCH 11CMx4M Produits disponibles en ville : Medica 315® bande anti œdème (SIGVARIS) Produit non prise en charge par la sécurité sociale
CARACTERISTIQUES 	Composition : <ul style="list-style-type: none"> Coton => 100% Absence de latex
INDICATIONS 	Lymphœdèmes Œdèmes des membres inférieurs du à insuffisance veineuse <i>cf fiche type de bandage</i>
CONTRE-INDICATIONS 	Artériopathie des membres inférieurs avec $IPS \leq 0.5$. Erysipèle non traité. Œdème des membres inférieurs lié à une insuffisance cardiaque décompensée, non traitée.
CONDUITE SOIGNANTE 	Démarrer le bandage à la racine des orteils par 2 tours, monter la bande en circulaire en prenant le talon. La bande peut être redescendue et remontée si trop longue, mais ne doit pas être coupée . 1 : Appliquer 2 tours de bandage à la base des orteils. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;">   </div> 2 : Appliquer directement le bandage sur le talon et revenir en 8 sur la cheville pour redescendre sur le dessous du pied. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>

Type de Modification	Date	N° Version	Auteur
Rédaction	18/03/2018	1	Médecin Vasculaire - IDE P/C – Pharmacien DMS
Mise à jour			
Validation	18/03/2018	1	Médecin Vasculaire - IDE P/C – Pharmacien DMS

	<p>3 : Remonter le bandage.</p> 
<p>FIXATION DU BANDAGE</p>	<p>Uniquement par une bande adhésive type sparadrap non tissé extensible.</p> <p>Attention ne pas utiliser les crochets pour la fixation, ils ne servent qu'à tenir la bande enroulée.</p>
<p>DUREE APPLICATION</p> 	<p>24h</p> <p>Doit être laissée jour et nuit.</p>

Type de Modification	Date	N° Version	Auteur
Rédaction	18/03/2018	1	Médecin Vasculaire - IDE P/C – Pharmacien DMS
Mise à jour			
Validation	18/03/2018	1	Médecin Vasculaire - IDE P/C – Pharmacien DMS