


Modalités de demande:

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

PANSEMENT A BASE DE NANO CRISTAUX D'ARGENT

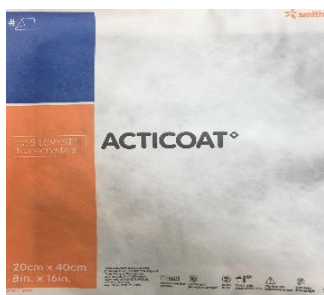

- ACTICOAT 40*40 cm / 752692
- ACTICOAT 20*40 cm / 752699
- ACTICOAT 10*20 cm / 752697
- ACTICOAT 10*10 cm / 752685


INDICATION

Grefe de peau surinfectée

ABSORPTION




EVALUATION COLORIELLE

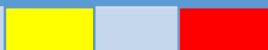

COMPOSITION

- Compresse de viscose et polyester enfermée dans un tricot de polyéthylène recouvert de nanocristaux d'argent

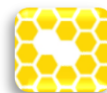

PROPRIETES

- Antimicrobien
- Libère des ions d'argent bactéricides Ag²⁺ au contact de l'eau
- Action rapide (30 min) et stable (72h)



CONTRE-INDICATIONS

- Patient devant subir une **IRM**
- **Hypersensibilité** avérée à l'argent



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Doit être humidifié à l'eau stérile avant la pose et rester humide en permanence pour être actif
- Ne pas associer à un corps gras



- Humidifier à l'eau stérile (ne pas utiliser le sérum physiologique)
- Poser le pansement sur la plaie, d'un côté ou de l'autre indifféremment
- Garder le pansement humide (mettre une couche d'hydrogel ou un cathéter court)
- Planifier l'irrigation au moins 2 fois par jour
- Recouvrir d'un pansement secondaire : compresse +/- bande

CONDUITE SOIGNANTE



- Renouvellement tous **les 3 jours** sauf si saturation

FREQUENCE DE CHANGEMENT

