

Modalités de demande :

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

PANSEMENT ALGinate



ALGOSTERIL® plaque 10X10cm / 752079
ALGOSTERIL® plaque 10x20cm / 752089
ALGOSTERIL® mèche plate 40cm / 752000
ALGOSTERIL® mèche ronde 30cm / 752002

BIATAIN® mèche 44x3cm / 752001

BIATAIN® compresse 5x5cm / 752012
BIATAIN® compresse 10x10cm / 752010
BIATAIN® compresse 15x15cm / 752020

INDICATIONS

- Plaies moyennement à fortement exsudatives
- Plaies hémorragiques
- Nécroses artérielles infectées ou non

ABSORPTION




EVALUATION COLORIELLE




COMPOSITION

- Polysaccharides naturels, extraits des parois cellulaires d'espèces d'algues brunes, enchaînement de 2 monomères d'acide mannuronique et d'acide guluronique

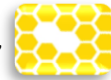

PROPRIÉTÉS

- Au contact des exsudats échange Na^+ - Ca^{2+} entre la plaie et le pansement → gélification des fibres d'alginate
- Maintien d'un environnement humide
- **Capacité d'absorption** très élevée, par diffusion passive et par capillarité
- **Activité hémostatique**
- « Piégeage » des bactéries

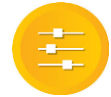

CONTRE-INDICATION

- Ne pas appliquer sur une nécrose peu exsudative à sèche sauf si objectif de momification d'une plaie du pied chez l'artéritique



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas associer à des solutions alcalines (Chlorhexidine, Benzalkonium, Javel...)
- Pas de Bétadine



- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique
- Sécher le pourtour de la plaie
- Appliquer la compresse sur la plaie en laissant dépasser au moins 1 cm, sauf si la peau péri-lésionnelle est lésée
- Humidifier la compresse ou la mèche avec du sérum physiologique, sauf si l'exsudat est très important
- Ne pas tasser la mèche dans la cavité de la plaie mais l'appliquer de manière lâche et uniforme
- Pour le retrait, irriguer l'alginate avec du sérum physiologique **uniquement**

CONDUITE SOIGNANTE



- Tous les 2 jours
- Si la plaie est très exsudative ou infectée : tous les jours

FREQUENCE DE CHANGEMENT

