

Modalités de demande :

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

PANSEMENT INHIBITEUR DE METALLOPROTEASES



URGOSTART® hydrocellulaire 13x12cm / 752031



URGOSTART® interface 10X10cm / 752036

INDICATIONS

Plaies chroniques à retard de cicatrisation

ABSORPTION

HYDROCELLULAIRE →

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


INTERFACE →



EVALUATION COLORIELLE

HYDROCELLULAIRE



INTERFACE


COMPOSITION

- Trame en polyester imprégnée d'une formulation polymérique de particules de carboxyméthylcellulose, vaseline et NOSF



PROPRIÉTÉS

- Au contact des exsudats, l'hydrocolloïde se gélifie et forme un film lipido-colloïdal
- Accélère la cicatrisation en inhibant les métalloprotéases en excès
- Absorbe les exsudats
- Maintien d'un milieu humide
- Confortable et repositionnable
- Retrait indolore

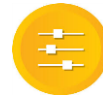

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité
- Plaies nécrotiques
- Plaies hémorragiques
- Plaies infectées
- Plaies tumorales



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Non recommandé pour les plaies aiguës
- Epidermolyse bulleuse
- Adhère aux gants chirurgicaux (possibilité de les humidifier au NaCl 0,9% pour faciliter la manipulation)



- Nettoyer à l'eau et savon doux ou au sérum physiologique
- Retirer les ailettes de protection
- Appliquer la face micro-adhérente sur la plaie
- Maintenir avec une bande ou un adhésif
- Possibilité de contention

CONDUITE SOIGNANTE



- Renouvellement tous les 2 à 4 jours
- 7 jours maximum
- Minimum 8 semaines de traitement

FREQUENCE DE CHANGEMENT

