


Modalités de demande:

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

PANSEMENT AU CHARBON

ACTISORB® 10,5x10,5cm / 752170

ACTISORB® 10,5x19cm / 752172

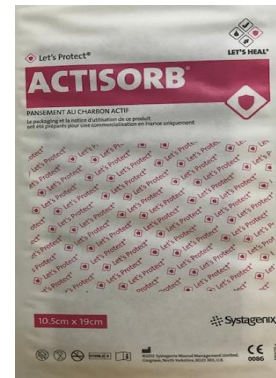

INDICATIONS

Plaies malodorantes, pansement secondaire

ADSORPTION des odeurs




EVALUATION COLORIELLE




COMPOSITION

- Trame polyester imprégnée d'une formulation polymérique de particules carboxyméthylcellulose, vaseline

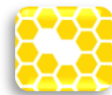

PROPRIÉTÉS

- Absorption et drainage des exsudats même peu fluides
- Adsorption des odeurs (charbon)

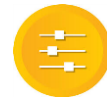

CONTRE-INDICATIONS

- Sensibilité à l'un des composants



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de plaie peu exsudative, appliquer sur la plaie un pansement gras
- Ne pas mettre en contact avec les exsudats
- Ne pas découper



- Nettoyer à l'eau et savon doux ou sérum physiologique
- Retirer les ailettes de protection
- Appliquer la face micro-adhérente sur la plaie
- Maintenir avec une bande ou un adhésif
- Possibilité de contention

**CONDUITE
SOIGNANTE**



- Renouvellement tous les jours
- Minimum 8 semaines de traitement

**FREQUENCE DE
CHANGEMENT**

