

Modalités de demande:

- SDT
- Ordonnance type
- DxCare

PANSEMENTS FIBRES A HAUT POUVOIR D'ABSORPTION



URGO CLEAN® mèche 5x40cm / 752093

URGO CLEAN® compresse 10x10cm / 752094

AQUACEL EXTRA® plaque 12,5x12,5cm / 752050

AQUACEL EXTRA® plaque 20x24cm / 752016

AQUACEL EXTRA® mèche 2,5cmx40cm / 752054

INDICATIONS: Plaies aiguës ou chroniques très exsudatives

ABSORPTION



EVALUATION COLORIELLE



COMPOSITION

- Fibres non tissées d'hydrocolloïde pur (carboxyméthylcellulose de sodium) pour Aquacel®
- Fibres non tissées de polyacrylate (Urgoclean®)



PROPRIÉTÉS

- Gélification des fibres au contact des exsudats
- Maintien de la plaie en milieu humide
- Protection des tissus néo-formés



CONTRE-INDICATIONS

- Brûlures du 3^{ème} degré
- Plaies sèches
- Mycoses



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Artériopathie de stade IV, plaies diabétiques, plaies infectées
- Rincer les antiseptiques avant la pose
- Imbiber pour saturer le pansement pour un retrait atraumatique



- Nettoyer à l'eau et savon doux ou selon la prescription médicale (pour les plaies aiguës)
- Sécher délicatement le pourtour de la plaie avec une compresse
- Comblé la plaie avec le nombre de pansements ou mèches nécessaires

CONDUITE SOIGNANTE



- Tous les 1 à 2 jours puis jusqu'à 7 jours selon les exsudats
- Pansement secondaire: film auto-adhésif transparent ou hydrocolloïde mince ou compresse non-tissé non stérile

FREQUENCE DE CHANGEMENT

