

Aide à l'application d'un pansement PICO

- ✓ Préparez votre matériel pour le pansement, dont votre kit PICO

Avant la pose et à chaque changement

- ✓ Nettoyez...
- ✓ ...et détermgez la plaie, selon le protocole du service
- ✓ Bien sécher la peau périphérique +++



Ouverture du kit

- ✓ Ouvrez le kit PICO:
- ✓ Prenez un pansement dans la partie supérieure (le second pansement vous servira lors de la prochaine réfection de pansement).
- ✓ Prenez la pompe dans la partie inférieure et mettez les piles à l'intérieur du dispositif



Clip ceinture



Inscription de la date de commencement de traitement

Insertion des deux piles



Application de la Gaze de remplissage

- ✓ Humidifiez la gaze de sérum physiologique et bien l'essorer après.
- ✓ Appliquez une couche de gaze antimicrobienne sur le lit de la plaie.
- ✓ Continuez l'application en couche jusqu'à ce que la gaze remplisse complètement la plaie.
- ✓ Evitez de la tasser dans la plaie.



Application du pansement PICO

- ✓ Appliquez le pansement PICO sur le lit de la plaie.
- ✓ Positionnez le Soft Port au-dessus de la peau péri-lésionnelle et non au-dessus de la plaie.
- ✓ Veillez à bien lisser les bordures siliconées du pansement. Au besoin, le pansement est repositionnable.



Plaie

Soft Port



- ✓ Connectez la tubulure du pansement au dispositif et vissez pour assurer la connexion.
- ✓ Appuyez sur la touche orange pour amorcer le traitement. Le pansement se rétracte.
- ✓ Après avoir obtenu une bonne étanchéité (pansement dur), vous devez appliquer les bandes de fixation adhésives fournies dans le kit sur les 4 côtés du pansement (moitié sur les bordures siliconées, moitié sur la peau saine).

Indicateurs de la console



Rappel

- ✓ Les pansements peuvent être laissés en place jusqu'à 7 jours en fonction de la quantité de liquides produits par la plaie. Cette quantité peut varier en fonction de la taille, de la quantité de drainage et de la localisation de la plaie. Il revient au clinicien de déterminer la fréquence de réfection du pansement.
- ✓ Si besoin, vous disposez d'un pansement additionnel fourni dans le kit.
- ✓ A J7, le dispositif s'arrête automatiquement, glissez les piles et le dispositif dans le sachet plastique. Mettez ce sachet plastique dans l'enveloppe T afin qu'il



- ✓ Si poursuite de la thérapie, ouvrir un autre kit pour 7 jours.

Commentaires libres

Secura spray (protecteur cutané) mis avant
Opsite car peau fragile