


# NOTICE D'UTILISATION DE LA POMPE APPLIX SMART

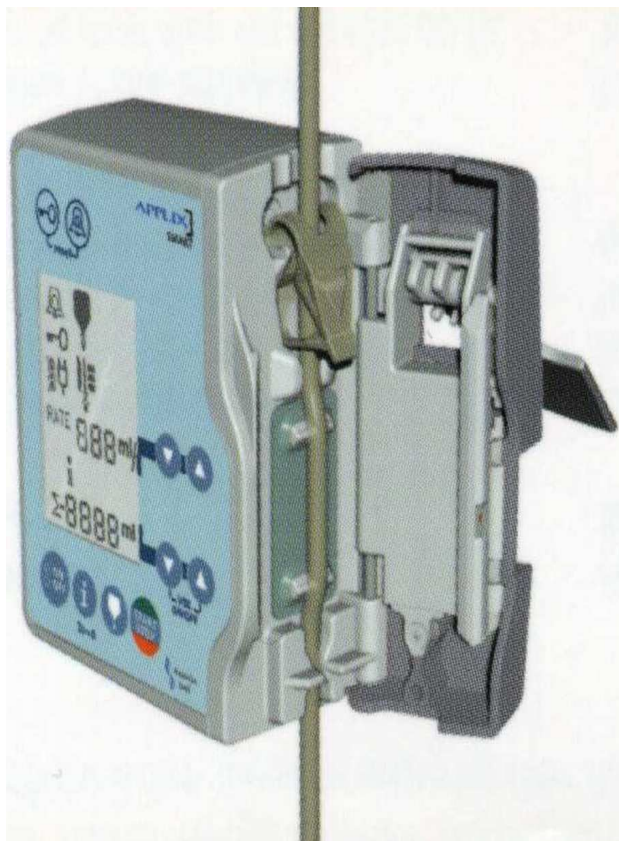

Allumer / Eteindre



Marche / Pause : démarre et stoppe la nutrition.  
Eteint l'alarme



Purge de la tubulure



Verrouillage du clavier



Réglage du volume sonore




Remise à zéro des données de la pompe : maintenir les deux touches appuyées pendant quelques secondes



Affichage des informations : volume total délivré depuis la dernière mise à zéro (maintenir appuyée quelques secondes pour remettre le volume à zéro)



Sélection du débit

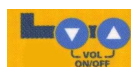

Programme le volume cible à délivrer, si nécessaire (appuyer sur les deux touches simultanément)

# Avant et après le passage du produit de nutrition, il est indispensable de rincer soigneusement la sonde avec de l'eau à l'aide d'une seringue de gavage.

## Mise en marche

Appuyer pendant quelques secondes sur la touche




Un signal sonore retentit. La pompe effectue un contrôle automatique

Les chiffres 1-4 puis des symboles apparaissent (initialisation de la pompe)


Les paramètres de la dernière programmation s'affichent

## Programmation de la pompe

Réglage du débit :

appuyer sur les touches  jusqu'à obtention de la valeur choisie

Programmation éventuelle du volume cible :

appuyer simultanément sur les deux touches  : le symbole  $\Sigma$  apparaît  
appuyer sur les touches jusqu'à obtention de la valeur choisie

## Mise en place de la tubulure

Connecter la tubulure à la poche d'alimentation en s'assurant que le clamp soit bien fermé

Déverrouiller la porte de la pompe au moyen du levier. Ouvrir la porte

En respectant le sens de la flèche, placer le clamp de sécurité dans son logement

Faire passer la tubulure sur le mécanisme d'entraînement et la fixer dans le

guide en s'assurant qu'elle n'est pas distendue

Refermer la porte de la pompe. Veiller à ce qu'elle s'enclenche bien

## Purge de la tubulure

Maintenir la touche appuyée



Purger la totalité de la tubulure

Lâcher la touche dès que l'opération est achevée

## Démarrage de la nutrition

Appuyer la touche START



La bande clignotante et les gouttes signalent le début de l'administration

## Pause de la nutrition

Appuyer sur la touche STOP



## Arrêt de la nutrition

Maintenir la touche appuyée pendant une seconde



Penser à maintenir la pompe branchée sur secteur

Les paramètres programmés restent en mémoire après extinction de la pompe

## Alarmes et actions correctives



Défaut technique ou système de pompage bloqué : changement de pompe

Batterie déchargée : rebrancher la pompe sur secteur (autonomie en fonctionnement : 4 à 6 heures)



Défaut de tubulure : changer ou vérifier l'intégrité de la tubulure

Porte ouverte : s'assurer que celle ci soit bien fermée



Occlusion en aval de la pompe (coté patient) ou occlusion en amont (coté poche) : supprimer la cause de l'obstruction (tubulure coudée ou bouchée...)

Tubulure vide : la tubulure n'est pas purgée ou la poche de nutrition est vide.



Volume cible à délivrer atteint : la nutrition est terminée

